

Guida per il telecomando Unitron



Grazie

Grazie per aver scelto un telecomando Unitron per il vostro apparecchio acustico Unitron. AUDIO BM, in collaborazione con Unitron, si preoccupa delle esigenze delle persone che hanno una perdita uditiva. Lavoriamo a stretto contatto con l'audioprotesista per offrire a tutti soluzioni avanzate specifiche. Perché sentire è importante.

Il vostro telecomando

Audioprotesista: _____

Telefono: _____

Numero di serie: _____

Sostituzione batteria : Una batteria AAA (1,5 Volt), standard o ricaricabile

Garanzia: _____


Data di acquisto: _____

Dimensione batteria



AAA

Sostituzione delle batterie

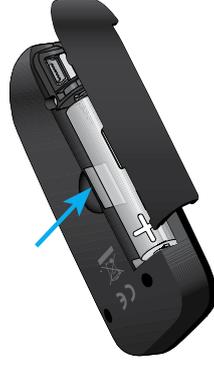

Avviso batteria scarica




L'indicatore

luminoso

cambia in giallo

Guida rapida

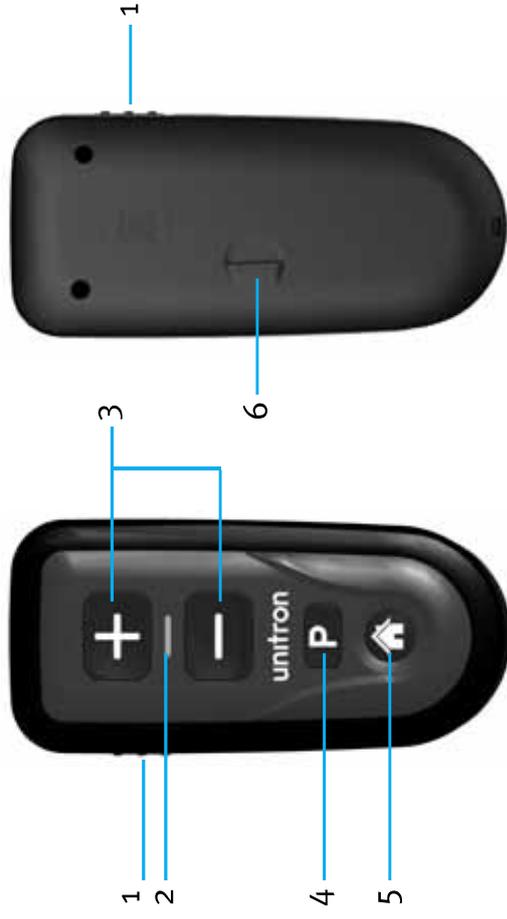

- 1 Interruttore di accensione/spegnimento
- 2 Indicatore luminoso
- 3 Pulsanti +/-
- 4 Pulsante di cambio programma
- 5 Pulsante Home
- 6 Vano batteria

Acceso/Spento




Indice

Caratteristiche del telecomando.....	2
Accensione e spegnimento del telecomando.....	4
Sostituzione della batteria.....	5
Istruzioni per l'uso	7
Regolazione dell'apparecchio acustico con il telecomando.....	9
Cura del telecomando.....	13
Pulizia del telecomando.....	14
Guida alla risoluzione dei problemi	15
Avvertenze	17
Dichiarazione di conformità.....	21

Caratteristiche del telecomando

- 1 Interruttore di accensione/spengimento** - consente di accendere e spegnere il telecomando e di bloccarlo per evitare l'invio accidentale di comandi
- 2 Indicatore luminoso** - si illumina quando si accende il telecomando o si preme qualsiasi pulsante
luce verde = batteria OK
luce gialla = batteria quasi scarica
- 3 Pulsanti +/-**
 - consentono di regolare il volume dell'apparecchio acustico
 - consentono di regolare il livello di comfort/chiarezza dell'apparecchio acustico
- 4 Pulsante di cambio programma** - seleziona il successivo programma di ascolto dell'apparecchio acustico
- 5 Pulsante Home** - riporta l'apparecchio acustico al programma e alle impostazioni iniziali
- 6 Vano batteria** - consente l'accesso per la sostituzione della batteria

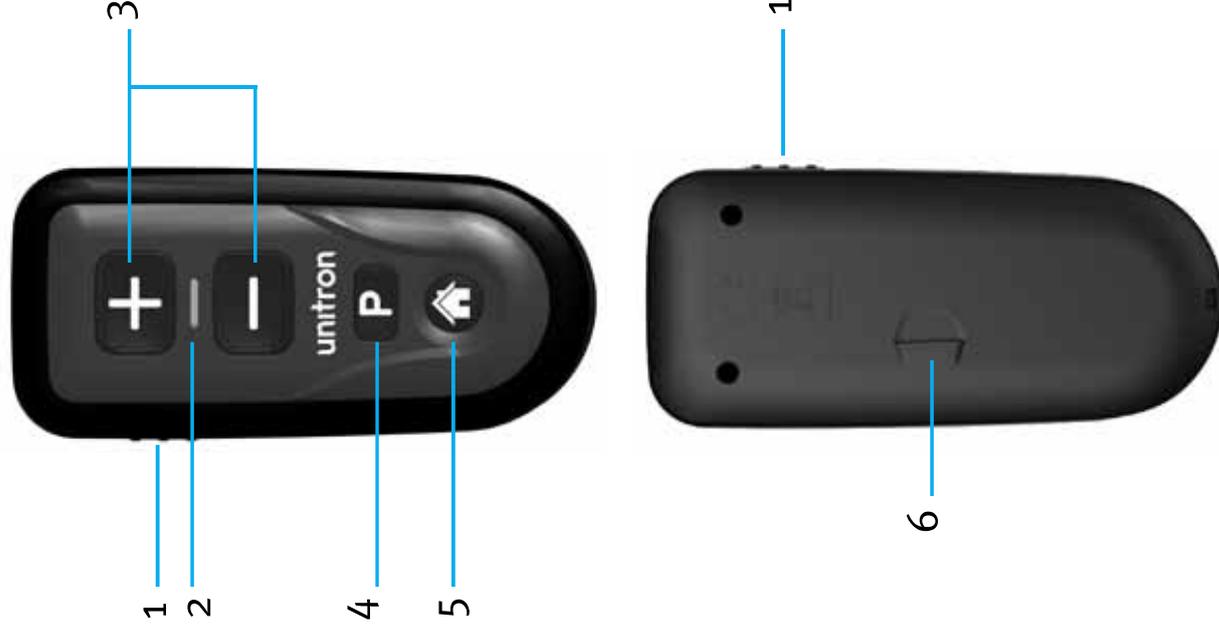

Accensione e spegnimento del telecomando

Il telecomando dispone di un pulsante di accensione e spegnimento situato sul lato sinistro del telecomando.

- Per accendere il telecomando, fate scorrere l'interruttore in posizione On o di sblocco, fino a scoprire un punto bianco.
- Per spegnere il telecomando, fate scorrere l'interruttore in posizione Off, nascondendo il punto bianco. La posizione Off dell'interruttore impedisce l'invio accidentale di comandi all'apparecchio acustico (mentre il dispositivo si trova nella borsetta o in tasca).



Sostituzione della batteria

Il vano della batteria è situato sulla parte posteriore del telecomando.

1. Fate scorrere il coperchio della batteria nella direzione della freccia.
2. Afferrate la batteria scarica con il pollice e l'indice, quindi rimuovetela.

3. Inserite la nuova batteria nel vano della batteria, con i poli +/- in posizione corretta, inserendo per primo il polo negativo (-) nel vano.

4. Fate scorrere il coperchio della batteria in direzione opposta a quella della freccia.



Avviso batteria scarica

Quando l'indicatore luminoso lampeggia in giallo anziché in verde, il telecomando sta segnalando che la batteria è quasi scarica. Questo avviso appare ogni volta che accendete il telecomando o inviate un comando all'apparecchio acustico, fino a quando non sostituite la batteria o quest'ultima non è completamente scarica.

Cura delle batterie

Smaltite sempre le batterie in modo sicuro e rispettose dell'ambiente.

Per prolungare la durata della batteria, ricordate di spegnere il telecomando quando non è in uso.

Istruzioni per l'uso

Prima di usare il telecomando, accendete l'apparecchio acustico per assicurarvi che siano in grado di ricevere i comandi dal telecomando.

Il telecomando è stato progettato per essere usato tenendolo comodamente nella vostra mano a una distanza massima pari alla lunghezza del braccio. Non è necessario puntare il telecomando in direzione dell'apparecchio acustico. Se collocate il telecomando appoggiandolo all'apparecchio acustico o troppo vicino ad esso, la sua efficienza potrebbe ridursi.

⚠ La porta mini-USB serve per la programmazione e deve essere utilizzata solo dall'audioprotesista.



⚠ Interferenze con i dispositivi medici:

Questo telecomando utilizza trasmissioni digitali codificate a bassa potenza per comunicare con l'apparecchio acustico. Sebbene improbabili, potrebbero verificarsi delle interferenze con i dispositivi medici, come i pacemaker. I portatori di pacemaker non devono quindi conservare il telecomando in un taschino sul petto.

Regolazione dell'apparecchio acustico con il telecomando

□ Pulsanti +/- per il bilanciamento comfort-chiarezza

Il bilanciamento comfort-chiarezza vi permette di gestire il livello del discorso e del rumore di fondo nell'apparecchio acustico, fornendo una possibilità di messa a punto aggiuntiva, oltre al tradizionale controllo del volume.

 Premete + per aumentare la chiarezza dei suoni, ad esempio del parlato.

 Premete - per migliorare il comfort nelle situazioni di ascolto rumorose.

Mentre viene regolato il comando, l'apparecchio acustico potrebbe emettere dei bip. Consultate la guida dell'apparecchio acustico per ulteriori informazioni sui bip dell'apparecchio acustico.

Pulsanti +/- per il controllo del volume

 Premete + per aumentare il volume.

 Premete - per diminuire il volume.

Man mano che viene regolato il volume, l'apparecchio acustico potrebbe emettere dei bip. Consultate la guida dell'apparecchio acustico per ulteriori informazioni sui bip di volume dell'apparecchio acustico.

Pulsante di cambio programma

 Premete il pulsante di cambio programma per passare al successivo programma di ascolto dell'apparecchio acustico. Consultate la guida dell'apparecchio acustico per determinare i programmi disponibili e i bip di segnalazione del programma.

Pulsante Home



Premete il pulsante Home per riportare l'apparecchio acustico al programma e alle impostazioni iniziali. Consultate la guida dell'apparecchio acustico per determinare qual è il programma iniziale.

Accessori

Il telecomando può essere utilizzato con un cordoncino da indossare intorno al collo per portare il telecomando. Può anche essere agganciato a un portachiavi. Collegare il cordoncino o il portachiavi al dispositivo, come illustrato di seguito.



Il telecomando può essere portato anche nella sua custodia borsa e può essere agganciato alla cintura o alla borsetta.

Se necessario, è possibile rimuovere la clip dalla custodia del telecomando. Usate uno strumento appuntito, come una penna, per spingere fino in fondo l'elemento circolare della clip. Mentre spingete con la penna, fate scorrere la clip verso il basso.



12

Cura del telecomando

Se non utilizzate il telecomando per lunghi periodi di tempo, aprite il vano della batteria e rimuovete la batteria.

Non usate il telecomando nel bagno o nella doccia e non immergetelo in acqua.

Se il telecomando si è bagnato, non cercate di asciugarlo in un forno tradizionale o a microonde. Non toccate i controlli di regolazione. Aprite lo sportello della batteria e lasciate asciugare il telecomando in modo naturale per 24 ore.

Protegete il telecomando dal calore eccessivo (asciugacapelli, vano portaoggetti o cruscotto dell'automobile).

Non lasciate cadere il telecomando ed evitate gli urti contro superfici dure.

13

Pulizia del telecomando

Non utilizzate alcol per pulire il telecomando .
Utilizzate un panno umido per pulire la parte esterna del telecomando.

Guida alla risoluzione dei problemi

Se riscontrate problemi con il telecomando, potete fare riferimento alla tabella per la risoluzione dei problemi, riportata di seguito. In caso di problemi con l'apparecchio acustico, consultate la guida dell'apparecchio acustico.

Causa

Possibile rimedio

L'indicatore luminoso non funziona

Non acceso

Accendere

Batteria quasi scarica o scarica

Sostituire la batteria

Contatto batteria non funzionante

Consultare l'audioprotesista

Batteria inserita al contrario

Inserire la batteria con il segno più (+) verso l'alto

L'indicatore luminoso si accende in giallo

Batteria quasi scarica

Sostituire la batteria

L'apparecchio acustico non risponde ai comandi del telecomando

Il telecomando viene tenuto troppo lontano

Avvicinare il telecomando

Il telecomando viene tenuto troppo vicino

Portare il telecomando alla massima distanza, pari alla lunghezza del braccio

Per altri problemi non elencati nella guida, contattate il vostro audioprotesista.

Avvertenze

- ⚠ Il telecomando deve essere utilizzato solo in base alle istruzioni fornite dall'audioprotesista.
- ⚠ Non usate il telecomando in aree a rischio di esplosione.
- ⚠ Non usate il telecomando in luoghi dove è proibito l'uso di dispositivi elettronici, come gli aerei.
- ⚠ Riponete il telecomando in un luogo sicuro in caso di TAC, risonanze magnetiche o altri esami con apparecchi elettromagnetici.
- ⚠ Qualsiasi modifica apportata al telecomando e non espressamente approvata da Unitron può invalidare l'autorizzazione dell'utente all'uso del dispositivo.

Avvertenze relative alla batteria

- ⚠ Non lasciate il telecomando o le batterie alla portata dei bambini o degli animali domestici.

⚠ Non mettete mai in bocca il telecomando o le batterie. In caso di ingestione della batteria, consultate immediatamente un medico.

Precauzioni

⚠ Se il telecomando non funziona dopo avere inserito correttamente una batteria nuova, contattate il vostro audioprotesista.

⚠ Portate sempre il telecomando e l'apparecchio acustico per rispondere alle domande del servizio di assistenza.

⚠ Al telecomando e agli apparecchi acustici viene assegnato un codice di comunicazione univoco. Questo codice fa in modo che il vostro telecomando non influisca sugli apparecchi acustici utilizzati da altri.

⚠ Il telecomando usa i componenti più moderni per offrire un'esperienza estremamente affidabile quasi senza alcuna interferenza da parte degli altri dispositivi. Tuttavia, quando si utilizza il telecomando vicino a un videoterminale, a un dispositivo per

telecomunicazioni come un telefono cellulare o ad altri campi elettromagnetici forti, per un corretto funzionamento potrebbe essere necessario mantenere una distanza di almeno 60 cm ~~(24 pollici)~~. Se gli apparecchi acustici non rispondono al telecomando a causa di un'interferenza anomala da parte del campo, allontanateli dal campo che genera il disturbo.

Codice di identificazione

Il numero di matricola e l'anno di produzione sono indicati all'interno del vano batteria.

Compilate l'etichetta adesiva con le informazioni sui contatti fornita insieme al nuovo telecomando e applicatela all'interno del coperchio del vano batteria.

Dichiarazione di conformità

Unitron Hearing dichiara che questo dispositivo soddisfa i requisiti della Direttiva sui dispositivi medici 93/42/CEE e della Direttiva sulle apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione 1999/5/CE. Il testo completo della Dichiarazione di conformità può essere ottenuto accedendo agli indirizzi indicati di seguito.

Produttore:

Unitron Hearing Ltd
20 Beasley Drive P.O. Box 9017
Kitchener, ON N2G 4X1
Canada

Rappresentante UE:

Unitron GmbH
Daimlerstrasse 22, 70736
Fellbach-Oeffingen, Germany

Questo dispositivo è certificato sotto:

USA FCC ID: VMY-RCV1

Canada IC: 2756A-RCV1

Questo dispositivo soddisfa la Parte 15 della Normativa FCC e il documento RSS-210 di Industry Canada. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

- 1) il dispositivo non deve causare interferenza nociva ~~e~~
- 2) il dispositivo deve sopportare qualsiasi interferenza in ingresso, incluse le interferenze in grado di causare funzionamenti indesiderati.

Qualsiasi modifica apportata a questo dispositivo e non espressamente approvata da Unitron Hearing può invalidare l'autorizzazione FCC all'uso del dispositivo.

Australia:  N15398

Nuova Zelanda: Z 1285



Con il simbolo CE, Unitron conferma che questo prodotto Unitron, accessori inclusi, soddisfa i richieste della Direttiva sui dispositivi medici 93/42/CEE e della Direttiva sulle apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione 1999/5/CE. I numeri che seguono il simbolo CE corrispondono al codice delle istituzioni certificate che sono state consultate a fronte delle suddette direttive.



Questo simbolo indica che i prodotti descritti in queste istruzioni per l'utente soddisfano i requisiti per una parte di applicazione di Tipo BF contenute in EN 60601-1. La superficie del dispositivo viene specificata come parte di applicazione di Tipo BF.



Questo simbolo indica che è importante per l'utente fare attenzione alle relative avvertenze contenute in queste guide per l'utente.



Etichetta di conformità Australian EMC and Radiocommunications per l'Australia.

Condizioni operative

Questo dispositivo è stato progettato in modo da funzionare senza problemi e senza limitazioni se usato come previsto, se non altrimenti indicato nelle guide per l'utente. -10° – 55° Celsius e umidità relativa <95% (senza condensa).

Condizioni di trasporto e stoccaggio

Durante il trasporto o il magazzinaggio, la temperatura non deve superare i valori limite di -20° – 60° Celsius e un'umidità relativa del 90% per periodi di tempo prolungati. Una pressione dell'aria compresa fra 500 e 1100 hPa è corretta.



Il simbolo con un cestino della spazzatura barrato segnala che il dispositivo non deve essere smaltito come un normale rifiuto domestico. Smaltire il dispositivo vecchio o inutilizzato in siti di smaltimento destinati ai rifiuti elettronici o consegnare il dispositivo al proprio audioprotesista per lo smaltimento. Uno smaltimento corretto protegge l'ambiente e la salute.




Unitron Hearing Ltd.

20 Beasley Drive, P.O. Box 9017,
Kitchener, ON N2G 4X1 Canada

European Representative

Max-Eyth-Straße 20, 70736
Fellbach-Oeffingen, Germany

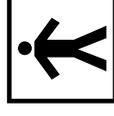

Distributore

www.unitron.com



11-051 029-5887-05

